

ELEKTRISCHER NASENSAUGER NAsALEX

Nasenputzgerät für Kinder



BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf unseres großartigen Produkts - elektrisches Nasensaugers für Kinder Nasalex. Er öffnet sanft die verstopfte Nase Ihres Babys. Er lindert Atemnot, verbessert das Wohlbefinden und hilft, die Erkältung Ihres Babys zu heilen. Einstellbare Saugleistung und USB-Aufladung.

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diesen elektrischen Nasensauger in Betrieb nehmen.

EIGENSCHAFTEN:

- Fünf Gänge können mit einer einzigen Taste eingestellt und ausgewählt werden. Dies ist einfach und bequem, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden
- Saugkopf und Düse aus lebensmitteltauglichem Silikon, weich und hautfreundlich
- Abnehmbar - zur bequemen Reinigung
- Ergonomisch - mit für Menschen angepasstem Radius, angenehm zu halten
- Wiederaufladbar - mit USB-Kabel, einfach zu laden und langlebig bedienbar
- Anti-Reflux - verhindert, dass der Schleim in die Nase zurückfließt

PAKETINHALT

- 1 x Nasensauger (Hauptgerät)
- 2 x Saugdüse
- 1 x Packung Schwämme,
- 1 x USB-Kabel



TECHNISCHE INFORMATION:

Motorspannung: 3 V

Maximale Saugleistung des Vakuums: 350 mmHg (60 kPa)

Lagerbedingungen: -10 - 55 °C (die relative Luftfeuchtigkeit bleibt innerhalb von 85 Prozent)

Betriebsbedingungen: 16 - 35 °C (die relative Luftfeuchtigkeit bleibt innerhalb von 85 Prozent)

USB-Kabellänge: ca. 77 cm

Material: Silikon

Geeignetes Alter: 0 - 6 Jahre alt

2 Größen der Nase-Spitzen:

Kürbis-förmige Spitze: Geeignet für

Trichterspitze: für 2 Jahre oder älter



Neugeborene

VORSICHT

Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und der Montageanleitung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug
- Dieses Produkt wurde entwickelt, um rinnenden Nasenschleim zu entfernen. Nicht für andere Zwecke verwenden.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Silikonkunststoffdüse fest am Einlassende fixiert ist.
- Das Produkt sollte auf den persönlichen Gebrauch beschränkt sein. Teilen Sie das Produkt nicht mit anderen, da dies zur Verbreitung von Infektionskrankheiten beitragen kann.

- Das Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Es sollte nicht für kommerzielle oder medizinische Zwecke verwendet werden.
- Wischen Sie das Gehäuse trocken, bevor Sie den Deckel öffnen.
- Waschen und reinigen Sie das Produkt nicht mit Verdünner, Benzol oder Lösungsmitteln.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es durch heftige Stöße beschädigt oder deformiert wurde, senden Sie es an den Verkäufer zurück, wenn das Produkt fehlerhaft ist.
- Das Produkt ist nur für den kompetenten Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Jede Verwendung durch das Kind selbst ist strengstens untersagt.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich zum Saugen des rinnenden Schleims von Kindern.
- Es ist strengstens untersagt, die Düse für längere Zeit an das Nasenloch des Babys zu halten. Ein paar Sekunden reichen aus, um den Schleim zu entfernen.
- Zwängen Sie die Düse nicht in das Nasenloch. Eine Berührung mit der Außenseite des Nasenlochs reicht aus, damit das Gerät gut funktioniert.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Wunden oder Symptome einer Entzündung oder Blutung in der Nase vorliegen oder nach einer HNO-Behandlung.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch reinigen (siehe Abschnitt Reinigung).
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort.
- Halten Sie den Nasensauger von Wärmequellen wie Kaminen, Heizkörpern, Öfen und anderen Geräten fern. Hitze kann das Gehäuse oder elektrische Teile beschädigen.
- Das Produkt darf nicht für medizinische Zwecke verwendet werden. Sollten gesundheitliche Probleme auftreten, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und wenden Sie sich an einen qualifizierten Arzt.

BEZEICHNUNGEN DER TEILE



1. DÜSE
2. SCHALE
3. SAMMELRAUM FÜR SCHLEIM
4. SAUGKÖRPER

MONTAGEANLEITUNGEN



Zu installierende Teile.



Installieren Sie die Abdeckung des Sammelraums



Installieren Sie die Abschirmung und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn. Installieren Sie schließlich die Spitze/Düse.

Wenn Sie das Gerät zerlegen möchten, befolgen Sie diese Schritte von hinten.



Stellen Sie immer sicher, dass sich der Filterschwamm unter dem Sammelraum befindet. Wenn der Filterschwamm verschmutzt ist, muss er ersetzt werden. Bitte ersetzen und installieren Sie ihn wie oben beschrieben.

VOR DEM GEBRAUCH:

1. Tauchen Sie die Saugdüse vor dem Gebrauch 10 Minuten lang in warmes Salzwasser, um sie zu desinfizieren. Installieren Sie dann den Nasensauger gemäß den Anweisungen. Schalten Sie den Schalter ein und beginnen Sie mit dem Absaugen des Nasenschleims von der Nasenwand.
2. **Was machen Sie bei trockenem Schleim?** Verwenden Sie Kochsalzlösung oder Nasenspray. Sprühen Sie die Nasenlöcher ein und benutzen Sie nach vier bis fünf Minuten den Sauger.
3. **Laden Sie das Produkt auf:**



Schließen Sie zum Laden des Produkts die USB-Leitung an das Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) oder an den Computer an. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Lampe. Das grüne Licht leuchtet, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

4. ACHTUNG: BITTE DENKEN SIE DARAN, DASS SIE KEINE ROHE GEWALT VERWENDEN ODER AUF ANDERE WEISE ERZWINGEN WOLLEN, DIE NASE DES BABYS TROCKEN ZU SAUGEN!

BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Installieren Sie den Nasensauger gemäß den obigen Anweisungen und drücken Sie zum Starten den Ein-Aus-Schalter.

Passen Sie die Saugstärke an:



Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät auf niedriger Stufe 1 zu starten.

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter zweimal, um das Gerät auf niedriger Stufe 2 zu starten.

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter dreimal, um das Gerät auf mittlerer Stufe 3 zu starten.


Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter viermal, um das Gerät auf hoher Stufe 4 zu starten.

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter fünfmal, um das Gerät auf hoher Stufe 5 zu starten.

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter sechsmal, um das Gerät auszuschalten.

2. Wenn der Nasenschleim trocken ist, können Sie zuerst mit Kochsalzlösung oder Nasenspray in das Nasenloch sprühen. Sprühen Sie ca. 1-2 Minuten vor dem Absaugen Salzlösung in das Nasenloch des Kindes, um den Schleim zu lösen und das Absaugen zu unterstützen.

3. Halten Sie das Baby aufrecht und führen Sie die Spitze in die Nase des Babys ein. Achten Sie darauf, die Spitze nicht zu weit in das Nasenloch zu stecken oder gegen die Innenwand des Nasenlochs zu drücken. Achten Sie darauf, die Spitze des Saugers in einem Winkel von 90° zu halten. Richten Sie ihn nicht in das Nasenloch. Lassen Sie den Sauger ca. 3-5 Sekunden lang laufen und den Schleim in den Sammelraum fließen. Wiederholen Sie den Vorgang im anderen Nasenloch, oder je nach Bedarf.

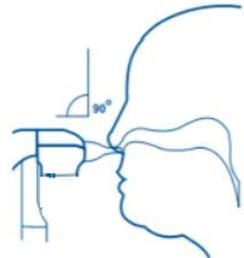

BESTEN ERGEBNISSE ERREICHEN: Während Sie den Sauger in einem Nasenloch verwenden, verschließen Sie das andere Nasenloch vorsichtig mit Ihrem Finger (1-2 Sekunden lang). Dadurch wird die Absaugung besser und einfacher.

4. Reinigen Sie die Bauteile.

VORSICHT: Führen Sie den Sauger NIEMALS zu weit in das Nasenloch ein. Setzen Sie die Spitze niemals fest gegen die Innenwand des Nasenlochs. Niemals an Ohren, Mund oder Augen anwenden. Dieser Sauger dient zur Reinigung von verstopften Nasenwegen. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

HINWEIS:

- Bitte fragen Sie Ihren Arzt, wann und wie oft Sie die Nasenwege Ihres Babys absaugen sollten.
- Wenn Sie sehen, dass der Auffangbecher voll ist, halten Sie das Gerät an und reinigen Sie es.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Reinigen Sie nach jedem Gebrauch die Saugdüse und andere abwaschbare Teile.

Zerlegen Sie zuerst alle zu entfernenden Teile. Trennen Sie den Ansaugteil des Saugers von der Basis, indem Sie den Daumen unter die Spitze legen und ihn so vom Sauger abziehen. Nehmen Sie die Schale und ziehen Sie sie ebenfalls weg (wenn es schwer geht, drehen Sie sie ein wenig im Uhrzeigersinn). Entfernen Sie nun auch den Schleimsammelraum, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Auffangbecher, Schale und Düse gründlich mit Wasser reinigen. Mit kochendem Wasser oder Dampf sterilisieren.



Hinweis:

Das Gehäuse ist nicht waschbar, bitte das Gehäuse nicht zum Reinigen in Wasser legen. Versuchen Sie nicht, das Hauptgerät durch Spülen mit Wasser zu reinigen, da es nicht wasserbeständig ist. Wischen Sie das Hauptgerät zum Reinigen mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

FEHLERBEHEBUNG:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Saugkopf ist nicht richtig installiert	Überprüfen Sie den Saugkopf und stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß installiert ist (befolgen Sie die Anweisungen).
	Der Auffangbecher ist zu voll oder verschmutzt	Reinigen Sie das Gerät wie im Abschnitt "Reinigung" beschrieben.
	Das Gerät könnte leer sein.	Laden Sie das Gerät auf.
Die Absaugung ist schwach oder funktioniert überhaupt nicht.	Das Gerät ist leer	Laden Sie das Gerät auf
	Der Auffangbecher ist zu voll oder verschmutzt	Reinigen Sie das Gerät wie im Abschnitt "Reinigung" beschrieben.
Ein unsichtbarer Nasenausritt in der Nasenhöhle	Die Saugdüse berührt nicht die Nase, Sie müssen das Vakuumprinzip anwenden, um den Schleim abzusaugen	Lassen Sie das Baby mit dem Kopf nach oben stehen oder liegen (wenn die Nase trocken ist, verwenden Sie Kochsalzlösung oder Nasenspray, um zuerst die Nasenhöhle zu befeuchten).



Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Vermeidung möglicher Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung; recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Er kann dieses Produkt für ein umweltverträgliches Recycling verwenden



Herstellererklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.