

## ASPIRADOR NASAL ELÉCTRICO NASALEX

Equipo de olfateo para niños



### MANUAL DEL USUARIO

Estimado cliente,

Gracias por comprar nuestro producto estrella: el aspirador nasal eléctrico para niños Nasalex. Despeja suavemente la nariz congestionada de su bebé. Alivia las dificultades respiratorias, mejora el bienestar del bebé y ayuda a curar sus catarros. Potencia de succión ajustable y carga mediante USB.

**Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de empezar a usar este aspirador nasal eléctrico.**

#### CARACTERÍSTICAS:

- Las cinco velocidades pueden ser ajustadas y seleccionadas mediante una tecla, fácil y práctico para satisfacer diferentes necesidades
- Cabezal de succión y boquilla en silicona de grado alimenticio, suave y agradable para la piel
- Diseño desmontable para limpiarlo cómodamente
- Diseño ergonómico con un radián humanizado, cómodo de sostener
- Diseño recargable con cable USB, fácil de cargar y duradero de usar
- Diseño antirreflujo que puede impedir que la mucosidad fluya de nuevo a la nariz

## CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 Aspirador Nasal (unidad principal)
- 2 Boquillas de Succión
- 1 Paquete de Esponjas,
- 1 cable USB



## INFORMACIÓN TÉCNICA:

Voltaje del motor: 3 V

Succión máxima al vacío: 350 mmHg (60 kPa)

Condiciones de almacenamiento: de -10 a 55 °C (la humedad relativa sigue dentro del 85 %)

Condiciones de operación: de 16 a 35 °C (la humedad relativa sigue dentro del 85 %)

Longitud del cable USB: aprox. 77 cm

Material: Silicona

Edad adecuada: 0 a 6 años

2 Tamaños de Picos Nasales:

Pico Calabaza: Idóneo para recién

Pico de embudo: De 2 años o mayores



## PRECAUCIONES

El incumplimiento de seguir estas advertencias y las instrucciones de montaje puede provocar lesiones graves o la muerte.

- Este producto no es un juguete
- Este Producto está diseñado para eliminar el exceso de secreciones de mucosidad nasal. No lo use para cualquier otro fin.
- Antes de usarlo, asegúrese de que la boquilla de silicona esté instalada firmemente en el extremo de entrada.
- El producto debe destinarse solamente a un uso personal. No comparta el producto con otras personas, ya que puede fomentar la propagación de enfermedades infecciosas.

- Este Producto está diseñado únicamente para uso en el hogar. No debe aplicarse con fines comerciales o médicos.
- Limpie la funda y séquela antes de abrir la tapa.
- No lave ni limpie el producto con diluyente, benceno o cualquier disolvente.
- Deje de usar el producto si está dañado o deformado por impactos intensos o devuélvelo al vendedor si el producto está defectuoso.
- El producto está diseñado para que lo use solamente un adulto competente; cualquier uso por el niño mismo está estrictamente prohibido.
- No utilice el producto para ningún otro propósito que no sea la succión de la mucosidad de los niños.
- Está estrictamente prohibido colocar la boquilla en la fosa nasal del bebé durante mucho tiempo; unos pocos segundos bastarán para extraer la mucosidad.
- No introduzca la boquilla en la fosa nasal; un toque con el lado exterior de la fosa nasal será suficiente para que la máquina funcione bien.
- No use el producto si hay alguna herida, síntoma de inflamación o sangrado en la nariz o después de un tratamiento otorrinolaringólogo.
- Asegúrese de limpiar el producto antes y después de usarlo, consultando la sección de limpieza.
- Guarde el producto en un lugar seco y fresco.
- Mantenga el aspirador nasal alejado de fuentes de calor, como chimeneas, radiadores, estufas y otros aparatos. El calor puede dañar la carcasa o las piezas eléctricas.
- El producto no debe utilizarse con fines médicos. Si hubiera algún problema de salud, deje de usar el producto inmediatamente y consulte con un médico cualificado.

## NOMBRES DE LAS PIEZAS



1. BOQUILLA
2. CARCASA
3. ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DE MUCOSIDAD
4. CUERPO DE SUCCIÓN

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Piezas que se deben instalar.  
almacenamiento



Instale la tapa del espacio de almacenamiento



Instale la protección y gírela en el sentido de las agujas del reloj



y, luego, instale el pico/boquilla

Si desea desmontar el aparato, siga los pasos en orden inverso.

**Asegúrese siempre de que la esponja filtrante esté insertada debajo del espacio de almacenamiento. Cuando la esponja filtrante esté sucia, debe cambiarse, por favor, reemplazarla e instalarla tal como se describe más arriba.**

### ANTES DE SU USO:

1. Antes de su uso, sumerja la boquilla de succión en agua salada tibia durante 10 minutos para desinfectarla, después, instale el inspirador nasal de acuerdo con las instrucciones. Active el interruptor y comience con la succión de las secreciones nasales de la pared nasal.

2. **¿Qué se puede hacer con mocos secos?** Use la solución salina o el spray nasal que compre. Rocíe las fosas nasales y pasados de cuatro a cinco minutos use el aspirador.

### 3. Cargue el producto:



Para cargar el producto, conecte la línea USB al cargador (no incluido) o al ordenador. La luz roja estará encendida mientras esté cargando; la luz verde se encenderá cuando termine de cargar.

**4. ATENCIÓN:** RECUERDE, NO USE LA FUERZA BRUTA O MEDIOS DE INTENSIDAD, ¡HAY QUE SER CUIDADOSO AL ASPIRAR LA NARIZ SECA DEL BEBÉ!

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:

1. Instale el aspirador nasal conforme a las instrucciones anteriores y pulse el interruptor de alimentación para encender.

Ajuste el nivel de succión:



Pulse el botón de encendido para iniciar el dispositivo en un nivel bajo 1.

Pulse el botón de encendido dos veces para iniciarlo a un nivel bajo 2.

Pulse el botón de encendido tres veces para iniciarlo un nivel medio 3.


Pulse el botón de encendido cuatro veces para iniciarlo a un alto nivel 4.

Pulse el botón de encendido cinco veces para iniciarlo a un nivel alto 5.

Pulse el botón de encendido seis veces para apagar el dispositivo.

2. Si la secreción nasal está seca, puede usar solución salina o un spray nasal para pulverizar en la fosa nasal primero. Aproximadamente 1-2 min antes de la aspiración, rocíe la solución salina en la fosa nasal del niño para soltar el moco y ayudar a la aspiración.

3. Sostenga al bebé erguido e inserte el pico en la fosa nasal del bebé. Tenga cuidado de no colocar el pico demasiado dentro de la fosa nasal ni ejercer presión contra la pared interior de la fosa nasal. Asegúrese de mantener el pico del aspirador en un ángulo de 90°. No lo apunte dentro de la fosa nasal. Deje que el aspirador funcione durante unos 3-5 segundos y observe el flujo de mucosidad hacia la cámara colectora. Repita la operación en la otra fosa nasal si es necesario.

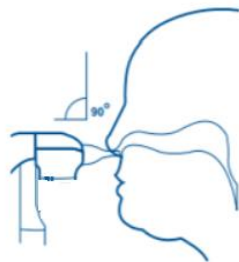

**OBTENGA LOS MEJORES RESULTADOS:** mientras esté usando el aspirador en una fosa nasal, cierre suavemente la otra fosa nasal con el dedo (durante 1-2 segundos), esto hará que la aspiración sea mejor y más fácil.

4. Limpie las piezas componentes.

**PRECAUCIONES:** NUNCA introduzca el aspirador demasiado dentro de la fosa nasal. Nunca presione el pico firmemente contra la pared interior de la fosa nasal. Nunca use el aparato en oídos, boca u ojos. Este aspirador está diseñado para limpiar la congestión en los conductos nasales. No use el dispositivo para cualquier otro fin que no sea el previsto.

**NOTA:**

- Consulte a su médico cuándo y con qué frecuencia debe aspirar las fosas nasales de su bebé.
- Cuando vea que la cámara colectora se está llenando, detenga el dispositivo y vacíela.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

Después de cada uso, limpie la boquilla de succión y otras partes lavables.

Primero, desmonte todas las piezas extraíbles. Separe la parte de succión del aspirador de la base colocando el pulgar debajo del cabezal y despegándolo del aspirador. Agarre la carcasa y tire de ella a la vez (si es difícil gírela un poco en el sentido de las agujas del reloj). Ahora extraiga también el depósito de almacenamiento de mucosidad girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

La cámara colectora, la carcasa y la boquilla deben limpiarse a fondo con agua. Esterilizar todo con agua hirviendo o con vapor.



Nota:

La carcasa no es lavable, por favor, no la sumerja en agua para limpiarla. No intente limpiar la unidad principal enjuagándola con agua porque no es resistente al agua. Para limpiar la unidad principal, límpiela con un paño suave y húmedo.

**RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:**

Problema	Posible causa	Solución
El dispositivo no funciona.	El cabezal de succión no está instalado correctamente	Verifique el cabezal de succión y asegúrese de que está instalado correctamente (siga las instrucciones).
	La cámara colectora está demasiado llena o sucia	Limpie el dispositivo tal como se describe en la sección de «limpieza».
	El dispositivo podría estar vacío.	Cargue el dispositivo.
La succión es débil o la succión no funciona en absoluto.	El dispositivo está vacío	Cargue el dispositivo
	La cámara colectora está demasiado llena o sucia	Limpie el dispositivo tal como se describe en la sección de «limpieza».
Una secreción nasal invisible en la cavidad nasal	la boquilla de succión no toca la nariz, debe aspirar el principio de vacío para extraer para el resfriado	deje que el bebé se quede de pie o se tumbe medio cuerpo, con la cabeza hacia arriba (si la nariz está seca, use solución salina o un spray nasal para humedecer primero la cavidad nasal).



## Instrucciones de reciclaje y desecho



Este marcado indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos; reciclarlos responsablemente para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, por favor emplee los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor al que compró el producto. Estos sistemas pueden gestionar este producto para implementar un reciclaje seguro para el medio ambiente



Declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la CE aplicables.