

ASPIRATOR NAZAL ELECTRIC NSALEX

Aspirator nazal pentru copii



MANUALUL UTILIZATORULUI

Stimate client,

Îți mulțumim că ai cumpărat produsul nostru – Aspirator nazal electric pentru copii Nasalex. Desfundă ușor nasul înfundat al copilului tău. Ameliorează respirația, îmbunătățește starea de bine și ajută la vindecarea răcelii copilului. Putere de aspirație reglabilă și încărcare USB.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a începe să utilizați acest aspirator nazal electric.

CARACTERISTICI:


* Cinci viteze pot fi ajustate și selectate printr-un singur control-cheie, ușor și convenabil pentru împlinirea diferitelor nevoi.

- Capul de aspirație de silicon de calitate înaltă, moale și potrivit pentru piele
- Design detașabil pentru o curățare convenabilă
- Proiectare ergonomică cu radian umanizat, ușor de ținut în mână
- Design reîncărcabil cu cablu USB, încărcare ușoară și de durată

* Design Anti-reflux, poate împiedica secrețiile nazale să curgă înapoi în nas

CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1 x Aspirator nazal (unitatea principală)
- 2 x duza de aspirație
- 1 x pachet de bureți,
- 1 x Cablu USB

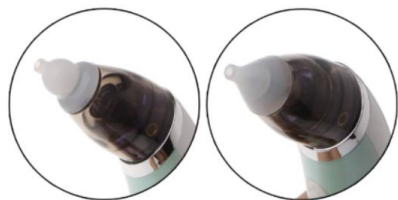

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiunea motorului: 3V

Aspirație maximă aspirator: 350mmHg (60kPa)

Condiții de depozitare: -10-55°C (Umiditatea relativă rămâne aprox. 85%)

Condiții de funcționare: 16-35 °C (Umiditatea relativă rămâne aprox. 85%)

Lungimea cablului USB: aproximativ 77 cm

Material: Silicon

Vârsta Potrivită: 0-6 ani

2 Dimensiuni Ale Vârfurilor Nasului :

Vârf De Dovleac: Potrivit pentru nou-

Vârful pâlnie: De la 2 ani în sus



născuți

ATENȚIE

Nerespectarea acestor avertismente și instrucțiuni de asamblare ar putea duce la vătămări grave sau deces.

- Acest produs nu este o jucărie
- Acest produs este conceput pentru a elimina excesul de mucus nazal. A nu se utiliza în alte scopuri.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că duza din plastic de siliciu este montată bine la capătul de admisie.
- Produsul ar trebui să fie limitat la uz personal. Nu împărtășiți produsul cu alte persoane, deoarece acest lucru poate ajuta la răspândirea bolilor infecțioase.

- Produsul este conceput numai pentru uz casnic. Nu poate fi folosit cu niciun scop comercial sau medical.
- Ștergeți carcasa înainte de a deschide capacul.
- Nu spălați și nu curățați produsul cu diluant, benzen sau orice solvent.
- Opriți-vă din utilizarea produsului dacă acesta este deteriorat sau deformat sau returnați-l vânzătorului dacă produsul este defect.
- Produsul este conceput numai pentru a fi utilizat de către adulți; orice utilizare de către copii este strict interzisă.
- Nu utilizați produsul în alt scop decât aspirarea mucoasei nazale a copiilor.
- Se interzice plasarea duzei la nara copilului pentru o lungă perioadă de timp; câteva secunde vor fi suficiente pentru a elimina mucoasa nazală.
- Nu fixați duza în nară; o atingere cu partea exterioară a nării va fi suficientă pentru ca aparatul să funcționeze bine.
- Nu utilizați produsul dacă există vreo rană, simptom de inflamație sau sângerare nazală sau post-tratament ENT.
- Curățați produsul înainte și după utilizare, în special secțiunea de curățare .
- A se păstra într-un loc uscat și răcoros.
- A se păstra aspiratorul nazal departe de sursele de căldură, cum ar fi șemineele, radiatoarele, sobele și alte aparate. Căldura poate deteriora carcasa sau piesele electrice.
- Produsul nu trebuie utilizat în scopuri medicale. Dacă există vreo problemă legată de sănătate, vă rugăm să nu mai utilizați produsul și să vă adresați unui medic calificat.

NUMELE PIESELOR



1. DUZĂ
2. CARCASĂ
3. SLOT DE STOCARE MUCUS
4. CORP ASPIRAȚIE

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE



Piese care trebuie instalate.
stocare



Se instalează capacul slotului de



Se instalează scutul și se rotește în sensul acelor de ceasornic se instalează vârful/duza



Dacă doriți să dezasamblați aparatul, urmați pașii de la început la sfârșit.

Asigurați-vă întotdeauna că buretele de filtrare este inserat sub fanta de depozitare. Atunci când buretele de filtrare este murdar, acesta trebuie înlocuit, vă rugăm să-l înlocuiți și să-l instalați așa cum este descris mai sus.

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

1. Înainte de utilizare, se dezinfectează duza de aspirație în apă sărată caldă timp de 10 minute, apoi se instalează aspiratorul nazal conform instrucțiunilor. Pornește întrerupătorul și începe cu aspirarea mucoasei din peretele nazal.
2. Ce **faceți cu mucoasa uscată?** Folosiți soluția salină sau spray-ul nazal obișnuit. Pulverizați narile și după patru până la cinci minute utilizați aspiratorul.

3. Încărcarea produsului:



Atunci când încărcați produsul, vă rugăm să conectați linia USB la încărcător (neinclus) sau la calculator. Lumina roșie va fi aprinsă la încărcare; Lumina verde va fi aprinsă la final.

4. **ATENȚIE:** REȚINEȚI, NU FOLOSIȚI FORȚA BRUTĂ PETRU ASPIRAREA NASULUI USCAT AL COPILULUI!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Instalați aspiratorul nazal în conformitate cu instrucțiunile de mai sus și apăsați comutatorul de putere pentru a începe.

Reglați nivelul de aspirație:



Apăsați butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul la un nivel scăzut 1.

Apăsați butonul de putere de două ori pentru a porni dispozitivul la un nivel scăzut 2.

Apăsați butonul de putere de trei ori pentru a porni dispozitivul la un nivel mediu 3.


Apăsați butonul de putere de patru ori pentru a porni dispozitivul la un nivel ridicat 4.

Apăsați butonul de putere de cinci ori pentru a porni dispozitivul la un nivel ridicat 5.

Apăsați butonul de putere de șase ori pentru a opri dispozitivul.

2. În cazul în care mucoasele nazale sunt uscate, puteți folosi soluție salină sau spray nazal pentru a pulveriza mai întâi în nară. Cu aproximativ 1-2 minute înainte de aspirație, pulverizați soluția salină în nara copilului pentru a slăbi mucusul și pentru a ajuta aspirația.

3. Țineți copilul în poziție verticală și introduceți vârful în nasul copilului. Aveți grijă să nu introduceți vârful prea departe în nară sau apăsați pe peretele interior al nării. Asigurați-vă că țineți vârful aspiratorului la un unghi de 90°. Nu-l îndrepta în sus în nară. Lasă aspiratorul să opereze cam 3-5 secunde, și privește cum intră mucusul în camera de colectare. Repetă procesul în cealaltă nară și după nevoie.

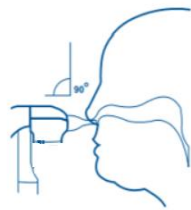

OBȚINE CELE MAI BUNE REZULTATE: în timp ce utilizați aspiratorul într-o nară, sigilați ușor cealaltă nară cu degetul (timp de 1-2 secunde), acest lucru va face aspirația mai bună și mai ușoară.

4. Curățați părțile componente.

ATENȚIE: NU introduceți aspiratorul prea departe în nară. Nu puneți niciodată vârful ferm pe peretele interior al nării. Nu folosiți niciodată în urechi, gură sau ochi. Acest aspirator este pentru curățarea congestiei în pasajele nazale. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele prevăzute.

NOTĂ:

- Vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră cât de des trebuie să aspirați pasajele nazale ale copilului dumneavoastră.
- Când cupa de colectare este plină, opriți dispozitivul și curățați-l.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

După fiecare utilizare, curățați duza de aspirație și celelate părți care pot fi spălate.

În primul rând, dezamblați toate piesele care pot fi dezamblate. Separați porțiunea de aspirație a aspiratorului de bază prin plasarea degetului mare sub vârf și desfacerea acesteia de pe aspirator. Prindeți carcasa și trageți (dacă este dificil, întoarceți-o puțin în sensul acelor de ceasornic). Acum scoateți, de asemenea, slotul de stocare a mucusului prin rotirea în sensul invers acelor de ceasornic.

Ceasca de colectare, carapacea și duza se curată bine cu apa. Sterilizați prin fierbere de apă sau prin abur.



Notă:

Fuselajul nu poate fi spălat, vă rugăm să nu puneți fuselajul în apă pentru a-l curăța. Nu încercați să curățați unitatea principală prin clătire cu apă, deoarece nu este rezistentă la apă. Pentru a curăța unitatea principală, ștergeți-o cu o cârpă moale, umedă.

PROBLEME:

Problema	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Capul de aspirație nu este instalat corect	Verificați capul de aspirație și asigurați-vă că acesta este instalat corect (urmați instrucțiunile).
	Paharul de depozitare este prea plin sau murdar	Curățați dispozitivul așa cum se menționează în secțiunea "Curățare".
	Dispozitivul ar putea fi descărcat.	Încărcați dispozitivul.
Aspirația este slabă sau nu există aspirație deloc.	Dispozitivul este descărcat.	Încărcați dispozitivul.
	Paharul de depozitare este prea plin sau murdar	Curățați dispozitivul așa cum se menționează în secțiunea "Curățare".
O secreție nazală invizibilă în cavitatea nazală	duza de aspirație nu atinge nasul, trebuie aspirat aspiratorul principal	lăsați copilul să stea în picioare sau să se întindă, capul sus (dacă nasul este uscat, folosiți soluție salină sau spray nazal pentru a umezi mai întâi cavitatea nazală).



Instrucțiuni de reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere în UE. Pentru a preveni posibila deteriorare a mediului sau a sănătății umane de la eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați-o în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și de colectare sau contactați comerciantul cu amănuntul în cazul în care produsul a fost achiziționat. Ei pot lua acest produs pentru reciclarea în condiții de siguranță a mediului



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.