

## ELEKTRIČNI NOSNI ASPIRATOR NASALEX

Otroški aparat za zamašen nos



### NAVODILA ZA UPORABO

Spoštovani,

Hvala, ker ste kupili naš vrhunski izdelek - električni nosni aspirator za otroke Nasalex. Nežno čisti zamašen nos vašega otroka. Lajša oteženo dihanje, izboljšuje počutje in pomaga pozdraviti prehlad vašega otroka. Nastavljiva stopnja moči sesanja in polnjenje s pomočjo USB-ja.

**Pred uporabo električnega nosnega aspiratorja, natančno preberite naslednja navodila.**

#### LASTNOSTI:

- Na voljo je pet moči sesanja, ki se lahko prilagodijo z samo enim gumbom;
- Mehka in koži prijazna silikonska sesalna glava;
- Enostavno razstavljanje za preprosto čiščenje;
- Ergonomska oblika za udobno uporabo;
- Napravo je mogoče enostavno polniti preko USB kabla, primerno za trajno uporabo;
- Zasnovan tako, da smrkelj ne izteka nazaj v nos.

## PAKET VSEBUJE

- 1 x Nosni aspirator (glavna enota)
- 2 x sesalna šoba
- 1 x paket filtrirnih gobic
- 1 x USB kabel



## TEHNIČNE INFORMACIJE

Napetost: 3V

Največji vakum sesanja: 350mmHg (60kPa)

Pogoji shranjevanja: -10 – 55°C (relativna vlaga ostane znotraj 85%)

Pogoji delovanja: 16 – 35°C (relativna vlaga ostane znotraj 85%)

Dolžina USB kabla: približno 77cm

Material: Silikon

Primerno za starost: 0-6 let

2 velikosti sesalnih šob:

Sesalna šoba v obliki bučke: primerna za novorojenčke

Sesalna šoba v obliki lijaka: primerna za otroke od starosti 2 leti in več



## OPOZORILA

Neupoštevanje teh opozoril in navodil za montažo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

- Ta izdelek ni igrača.
- Ta izdelek je namenjen izključno za odstranjevanje prekomerne sluzi v nosu. Ne uporabljajte ga za katerikoli drug namene.
- Pred uporabo se prepričajte, da je silikonska šoba trdno nameščena na pokrov naprave.
- Izdelek je potrebno omejiti na osebno uporabo. Izdelka ne delite z drugimi, ker lahko to pomaga pri širjenju nalezljivih bolezni.
- Izdelek je zasnovan samo za domačo uporabo. Ne uporabljajte ga za komercialne ali medicinske namene.
- Izdelka ne umivajte in ne čistite s razredčilom, benzenom ali katerim koli topilom.

- Če je izdelek poškodovan ali je prejel več hudih udarcev ga ne uporabljajte. Če je izdelek pokvarjen ga vrnite prodajalcu.
- Izdelek je zasnovan samo za kompetentno uporabo odraslih; vsakršna uporaba izdelka s strani samega otroka je strogo prepovedana.
- Izdelek uporabljajte izključno za sesanje otroških smrkljev.
- Šobe NIKOLI ne vstavljajte v otrokovo nosnico za daljše časovno obdobje. Takšno dejanje je strogo prepovedano; nekaj sekund je več kot dovolj da odstranite smrkelj.
- Šobe ne zapičite v nosnico; rahel dotik z zunanjo stranjo nosnice bo dovolj, da izdelek opravi svoje delo.
- Ne uporabljajte izdelka, če v nosu ali po zdravljenju z ENT obstaja kakšna rana ali simptom vnetja ali krvavitve.
- Pred uporabo in po uporabi očistite izdelek, glejte poglavje čiščenje.
- Izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru.
- Nosni aspirator naj bo ločen od virov toplote, kot so kamini, radiatorji, peči in druge naprave. Toplota lahko poškoduje ohišje ali električne dele.
- Izdelka ne smete uporabljati v medicinske namene. Če pride do kakršnih koli zdravstvenih težav, takoj prenehajte z uporabo izdelka in se posvetujte s usposobljenim zdravnikom.

## SESTAVNI DELI



1. SESALNA ŠOBA
2. LUPINA
3. REŽA ZA SHRANJEVANJE SMRKLJEV
4. SESALNO TELO

## NAVODILA ZA SESTAVO



Deli, ki jih je potrebno sestaviti.



Najprej namestite režo za shranjevanje smrkcljev.



Namestite lupino in jo obrnite v smeri urinega kazalca.



Namestite še sesalno šobo

Če želite aparat razstaviti, sledite korakom od zadaj naprej.

**Vedno se prepričajte, da je pod režo za shranjevanje nameščena filtrirna gobica. Ko je filtrirna gobica umazana, jo je potrebno zamenjati. Ravnajte se po zgornjih navodilih.**

### PRED UPORABO:

1. Pred uporabo sesalno šobo za 10 minut namočite v toplo slano vodo, da jo razkužite, nato nosni aspirator sestavite v skladu z navodili. Vključite stikalo in pričnite s sesanjem smrkcljev.

2. **Kaj storiti z zasušenimi smrkclji?** Uporabite fiziološko raztopino ali nosno razpršilo (kupite v lekarni ali drogeriji). Razpršite jo v nosnice in po štirih do petih minutah uporabite še aspirator.

### 3. Polnjenje:



Ko želite napravo napolniti, USB-kabel priključite na polnilnik (ni priložen) ali računalnik. Ko se naprava polni bo svetila rdeča lučka, ko je polnjenje končano bo zasvetila zelena lučka.

**4. POZOR: prosimo, ne pozabite! NE UPORABLJAJTE SUROVE SILE ALI NASILJA, DA IZSESATE OTROKOV NOS!**

## NAVODILA ZA DELOVANJE:

1. Namestite nosni aspirator po zgornjih navodilih in pritisnite stikalo za vklop.

Prilagodite nivo sesanja:



Pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Naprava bo pričela delovati z najnižjo močjo - raven 1.

Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da vklopite nizko moč sesanja – raven 2.

Pritisnite gumb za vklop trikrat, da vklopite srednjo moč sesanja – raven 3.


Pritisnite gumb za vklop štirikrat, da vklopite močno moč sesanja – raven 4.

Pritisnite gumb za vklop petkrat, da vklopite najmočnejšo moč sesanja – raven 5.

Pritisnite gumb za vklop šestkrat, da napravo izklopite.

2. Če je nosni izloček suh, lahko najprej uporabite fiziološko raztopino ali pršilo za nos. Pred aspiracijo razpršite fiziološko raztopino po otroški nosnici in pustite približno 1-2 minuti, da se nosni izcedek razmehčate. To vam bo olajšalo uporabo aspiratorja.

3. Dojenčka/otroka držite pokonci in konico šobe vstavite v otrokov nos. Pazite, da konice ne postavite predaleč v nosnico ali da ne pritiskate na notranjo steno nosnice. Konico aspiratorja držite pod kotom 90°. Aparata ne usmerjajte navzgor v nosnico. Aspirator pustite delovati približno 3-5 sekund in opazujte, kako sluz teče v režo za shranjevanje. Postopek ponovite še v drugi nosnici oziroma po potrebi.

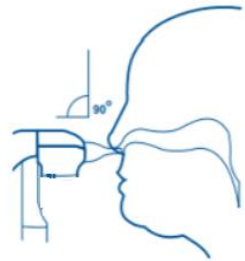

**ZA DOSEGANJE NAJBOLJŠIH REZULTATOV:** medtem, ko aspirator uporabljate v eni nosnici, drugo nosnico rahlo zatesnite s prstom (za 1-2 sekunde), tako bo aspiracija boljša in lažja.

4. Očistite sestavne dele

**POZOR:** Aspiratorja NIKOLI ne vstavite preveč globoko v nosnico. Konice nikoli postavljajte trdno ob notranjo steno nosnice. Aparata NIKOLI ne uporabljajte na ušesih, ustih ali očeh. Aspirator je namenjen izključno čiščenju nosa, zato ga uporabljajte izključno za to čemur je namenjen.

### OPOMBA:

- Posvetujte se s svojim zdravnikom o tem, kdaj in kako pogosto morate aspirirati nosne poti svojega otroka.
- Ko vidite, se zbiralna reža napolni, ustavite napravo in jo očistite.

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Po vsaki uporabi očistite sesalno šobo in druge dele, ki jih je mogoče oprati.

Najprej razstavite vse dele, ki jih je mogoče odstraniti. Sesalni del aspiratorja ločite od glavne enote tako, da postavite palec pod konico sesalne šobe in jo nato povlečete stran od aspiratorja. Primite za lupino in jo prav tako potegnite stran (če je težko, jo rahlo zavrtite v smeri urinega kazalca). Zdaj odstranite tudi režo za shranjevanje tako, da jo zasukate v nasprotni smeri urinega kazalca.

Režo za shranjevanje, lupino in šobo temeljito očistite z vodo. Sterilizirajte z vrelo vodo ali paro.



Opomba:

Glavna enota ni primerna za pranje. Trupa naprave nikoli ne pomakajte v vodo, saj naprava ni vodoodporna. Za čiščenje glavne enote, uporabite mehko vlažno krpo.

## REŠEVANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje.	Sesalna glava ni pravilno nameščena.	Preverite sesalno glavo in se prepričajte, da je pravilno nameščena (glejte navodila za sestavo).
	Reža za shranjevanje je polna ali nečista.	Očistite napravo tako kot je opisano v poglavju "čiščenje".
	Naprava je izpraznjena .	Napolnite napravo.
Sesanje je šibko ali pa sploh ne deluje.	Naprava je izpraznjena.	Napolnite napravo.
	Reža za shranjevanje je polna ali nečista.	Očistite napravo tako kot je opisano v poglavju "čiščenje".
Ni vidnega izcedka v reži za shranjevanje.	sesalna šoba se ne dotika nosu, za sesanje se morate s šobo dotakniti sluzi v nosu.	Otrok naj stoji ali na pol leži z glavo navzgor (če je nos suh najprej uporabite fiziološko raztopino ali nosni sprej, da nosno votlino najprej navlažite).



## Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrízanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.